



MODE D'EMPLOI POUR LE MONTAGE DE LA VISIÈRE

1 DÉTACHEZ LES 2 EXTRÉMITÉS DU SERRE-TÊTE

Les trois parties du serre-tête sont attachées en deux points pour faciliter le transport. Détachez ces deux parties en tirant sur les deux points d'attache.

2 ATTACHEZ LA PARTIE CENTRALE DU SERRE-TÊTE ♥

L'un des côtés du serre-tête se termine par une attache en demi-cercle avec un cœur juste à côté. Insérez le demi-cercle dans la fente qui se trouve en haut au centre de la partie visière avec un «cœur» ♥ .

3 FIXEZ LE SERRE-TÊTE SUR LE CÔTÉ GAUCHE DE LA VISIÈRE

Insérez l'attache en demi-cercle se trouvant sur la languette du haut avec un triangle dans la fente située en haut à gauche de la visière.

4 FIXEZ LE SERRE-TÊTE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA VISIÈRE

Insérez l'attache en demi-cercle se trouvant sur la languette du milieu avec un carré dans la fente située en haut à droite de la visière.

5 AJUSTEZ LE SERRE-TÊTE À VOTRE DIAMÈTRE DE TÊTE

A l'aide des deux languettes du serre-tête, ajustez la visière au diamètre de votre tête. Pour plus de facilité, maintenez le diamètre avec vos doigts et enlevez la visière de votre tête. Insérez les deux attaches en demi-cercle dans les fentes qui correspondent au diamètre de votre tête.



TUTO <https://www.facebook.com/cityfab1/videos/216917612854039/>

  [ilikemolenbeek](https://www.likemolenbeek.be) | www.molenbeek.be | [#molenbeek](https://twitter.com/molenbeek)

A l'initiative de la **Bourgmestre Catherine Moureaux**, avec le soutien du Collège échevinal.




GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEZICHTSMASKER

1 MAAK DE BOVENSTE TWEE UITEINDEN VAN HET GEZICHTSMASKER LOS

De drie gedeelten van de hoofdband zijn met twee punten bevestigd om het transport te vergemakkelijken. Verwijder deze twee gedeelten door aan de twee bevestigingspunten te trekken.

2 BEVESTIG HET MIDDELSTE GEDEELTE VAN DE HOOFDBAND

Eén van de zijkanten van de hoofdband loopt uit in een halfcirkelvormig haakje met een hart net ernaast. Schuif de halve cirkel in de gleuf die zich bovenaan in het midden van het gezichtsmasker bevindt met een «hart» .

3 MAAK DE HOOFDBAND VAST AAN DE LINKERKANT VAN HET GEZICHTSMASKER


Schuif het halfcirkelvormige haakje aan de bovenste strip met een driehoek in de gleuf links bovenaan het masker.

4 MAAK DE HOOFDBAND VAST AAN DE RECHTERKANT VAN HET GEZICHTSMASKER

Schuif het halfcirkelvormige haakje op de middenste strip met een vierkant in de bovenste rechtergleuf van het masker.

5 PAS DE HOOFDBAND AAN AAN UW HOOFDDIAMETER

Pas het gezichtsmasker aan aan de diameter van uw hoofd met behulp van de twee strips van de hoofdband, Om het iets makkelijker te maken, meet de diameter met uw handen en zet het gezichtsmasker af. Schuif de twee haakjes in de vorm van een halve cirkel in de gleuven die overeenkomen met de diameter van uw hoofd.

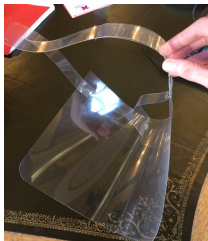

TUTO <https://www.facebook.com/cityfab1/videos/244996069971237/>

  [ilikemolenbeek](https://www.ikemolenbeek.be) | www.molenbeek.be | [#molenbeek](https://twitter.com/molenbeek)

Op initiatief van **Burgemeester Catherine Moureaux**, met de steun van het Schepencollege.